

АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ

(верхняя часть тела)

КУРС ЛЕЧЕНИЯ:
до 30 мин ежедневно, до 20 дней

противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий, регенераторный и иммунокорректирующий эффекты, улучшение регионального кровообращения

Размер пятна




Вплотную



Время
экспозиции пятна

до 5 мин

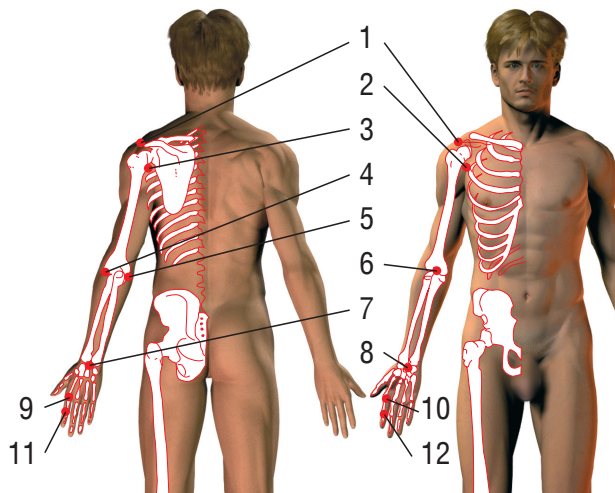

Облучение проводят по полям, 2-6 полей на сустав, статично или передвигая луч вдоль проекции суставной щели.

+ поля воздействия

Плечевой сустав

- 1 – верхнебоковая поверхность сустава, между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости;
- 2 – передняя поверхность сустава, ниже большого бугра плечевой кости;
- 3 – задняя поверхность сустава, ниже акромиального отростка лопатки.

Локтевой сустав

- 4 – наружная поверхность сустава около локтевого отростка;
- 5 – внутренняя поверхность сустава около локтевого отростка;
- 6 – середина локтевого сгиба.

Лучезапястный сустав

- 7 – тыльная поверхность сустава, ближе к локтевой стороне;
- 8 – ладонная поверхность сустава в середине лучезапястной складки.

Пястно-фаланговые суставы

- 9-10 – тыльные и ладонные поверхности кисти по проекции соответствующей суставной щели.

Межфаланговые суставы кисти

- 11-12 – тыльные и ладонные поверхности кисти по проекции соответствующей суставной щели.