

АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ

(нижняя часть тела)

КУРС ЛЕЧЕНИЯ:
до 30 мин ежедневно, до 20 дней

противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий, регенераторный и иммунокорректирующий эффекты, улучшение регионального кровообращения

Размер пятна




Вплотную



Время
экспозиции пятна

до 5 мин

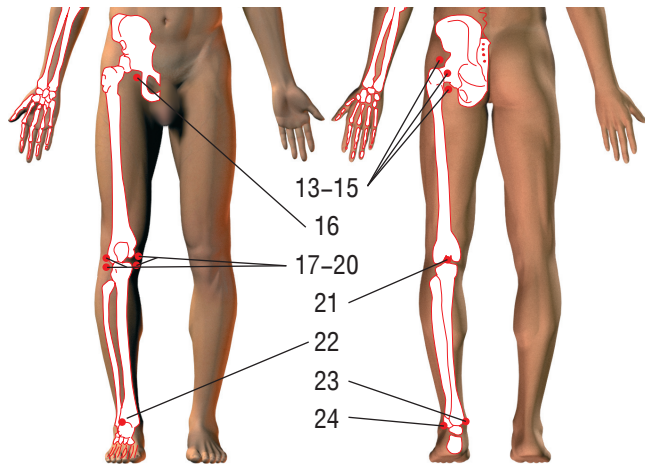

+ поля воздействия

Тазобедренный сустав

13–15 – сверху, сзади и снизу на 1 см от большого вертела бедренной кости;
16 – середина паховой складки.

Коленный сустав

17–20 – по одному – два поля (в зависимости от объема сустава) по боковой поверхности (справа и слева) по проекции суставной щели;
21 – центр подколенной ямки.

Голеностопный сустав

22 – тыльный сгиб стопы по проекции суставной щели;
23 – область между внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием;
24 – область между наружной лодыжкой и ахилловым сухожилием.

Межфаланговые суставы стопы

25–25 – обе поверхности стопы по проекции соответствующей суставной щели.

Облучение проводят по полям, 2–6 полей на сустав, статично или передвигая луч вдоль проекции суставной щели.