

# ОСТЕОХОНДРОЗ

КУРС ЛЕЧЕНИЯ:  
до 30 мин ежедневно, 15–20 дней

противовоспалительный, противоотечный,  
иммунокорректирующий эффекты

Размер пятна




**Вплотную**

 Время экспозиции пятна  
на воспринимающее поле

**до 1 мин** для шейного отдела,  
**до 2 мин** для грудного отдела,  
**до 4 мин** для пояснично–  
крестцового отдела

## + поля воздействия

- 1 – Шейный отдел позвоночника.
- 2 – Грудной отдел позвоночника.
- 3 – Пояснично–крестцовый отдел позвоночника.

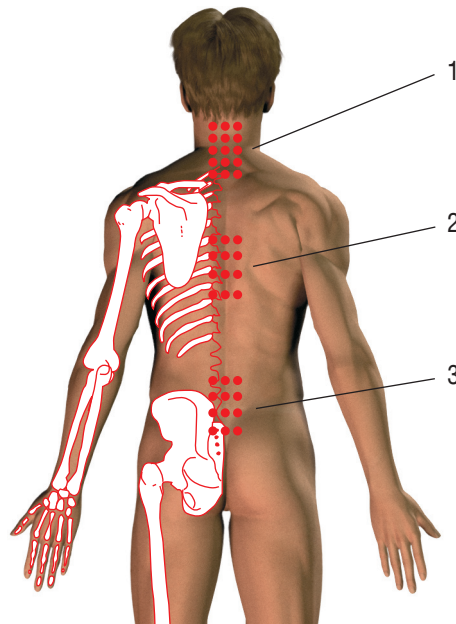

Облучение проводят по группам из трех полей: с двух сторон и вдоль ствола позвоночника, начиная с области наибольшей болезненности при нажатии пальцами или движении.