

АНГИНА, ТОНЗИЛЛИТ

КУРС ЛЕЧЕНИЯ:
ежедневно до 10 мин, 7 – 10 дней

противовоспалительный и обезболивающий эффекты

- + облучение по полям справа и слева переднебоковой поверхности шеи ниже угла нижней челюсти

Размер пятна




Вплотную



Время
экспозиции пятна

2-3 мин

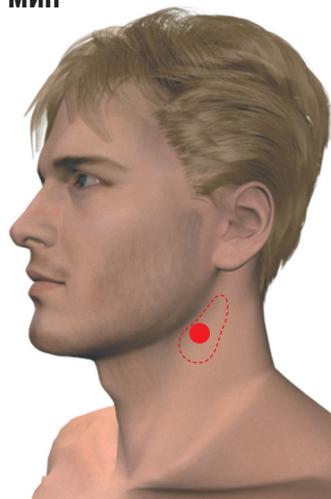

- + непосредственное облучение миндалины одним полем

Размер пятна




7 - 10 мм



Время
экспозиции пятна

1,5-2 мин

область миндалин

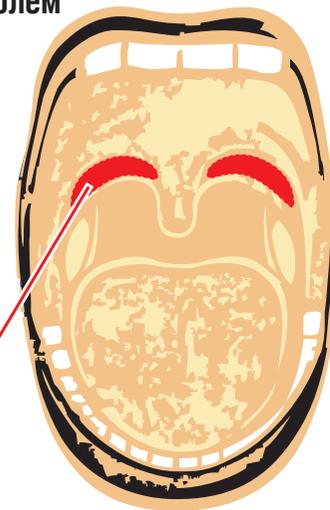

При ангине или обострении хронического тонзиллита в начальных стадиях воспалительного процесса на первых 2-х процедурах возможно воздействие ультрафиолетовым излучением (кварцевая лампа). Далее лечение продолжать аппаратом СВЕТОЗАР.