

ОЖОГИ


КУРС ЛЕЧЕНИЯ:

до 5 мин ежедневно, 5 – 10 дней

противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий и регенераторный эффекты, улучшение местного кровообращения, иммунокорректирующее действие

+ облучение ожога и прилегающих на 1-2 см участков

Размер пятна

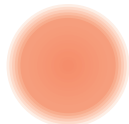


12 - 15 мм



Время экспозиции пятна

3-4 мин

[скорость перемещения пятна – 1 см/сек]

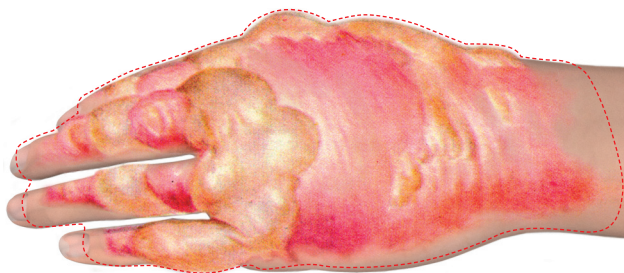

После получения ожога сразу же обратитесь к врачу!
СВЕТОЗАР используйте как физиотерапевтическое средство для скорейшего заживления ран только после консультации врача

Облучение следует проводить после тщательного туалета ожоговых ран, от краев к центру, захватывая здоровые ткани.

За одну процедуру следует облучать не более 10% поверхности тела.