

ЛИШАЙ

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ

КУРС ЛЕЧЕНИЯ:
до 30 мин ежедневно, до 15 дней

противовоспалительный, обезболивающий и регенераторный эффекты, улучшение регионального кровообращения

Размер пятна



7 - 10 мм



Время экспозиции пятна на воспринимающее поле


1 МИН в шейном отделе позвоночника,

2 МИН в других отделах позвоночника,

3-5 МИН в местах сыпи

+ поля воздействия

- 1 – По 1–3 сегмента спинного мозга, из нервных корешков которых формируется пораженный инфекционным процессом нерв.
- 2 – По 2–5 полей по ходу пораженного нерва в местах высыпаний.
- 3 – Область групповых высыпаний.

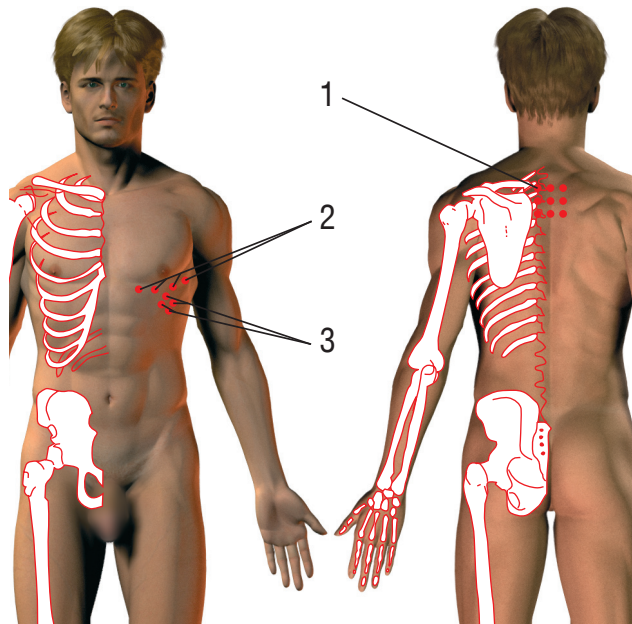

Облучение вдоль позвоночника проводят по группам из трех полей: с двух сторон и вдоль ствола позвоночника. Облучение в местах высыпаний проводят по ходу пораженного нерва (по направлению от позвоночника).